



Fábrica de Detergentes
Rey Alberto 3884 – San Miguel
Santiago
Movil +56 9 86797865
www.jypquimicos.cl

FICHA TECNICA

DETERGENTE ENZIMATICO PARA USO CLINICO

Es un detergente multienzimático líquido con aroma a limón, indicado para el prelavado, de instrumental. El equipo por limpiar debe permanecer en contacto con el DETERCEL ENZIMÁTICO no menos de 5-10 minutos, este producto es apto para lavado de toda clase de instrumental quirúrgico en los campos médico, clínico, bacteriológico, odontológico y afines. Esta solución enzimática es apropiada para la limpieza de endoscopios, antes de los procesos de desinfección. Es ideal para remover y degradar sangre, proteínas, desechos celulares, tejidos, secreciones respiratorias, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de material orgánico.

Composición:

Enzimas específicas, tensoactivos, conservantes

Instrucciones de uso:

Adicionar de 5 a 10mL del DETERCEL ENZIMÁTICO por cada litro de agua potable que no debe estar a una temperatura mayor de 40°C. Sumergir completamente el material contaminado en la dilución recientemente preparada, por no menos de 5-10 minutos. Usar cepillo o esponja suave, si es necesario. Si cuenta con equipo para lavado automático, siga las instrucciones del equipo, usando el producto diluido. Enjuagar muy bien el instrumental con agua potable, asegurarse de secar totalmente con material limpio y continuar con el proceso de desinfección o esterilización apropiado. La apariencia del DETERCEL ENZIMÁTICO es un Líquido, translúcido, de olor característico y libre de partículas y, está compuesto por enzimas activas tales como la proteasa, celulasa y amilasa, posee tensoactivos y estabilizantes, así como antioxidantes. El DETERCEL ENZIMÁTICO tiene una vida útil de 3 años y es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento, siguiendo los cuidados de no mezclar el producto con blanqueadores, ácidos fuertes ni otros detergentes,



Fábrica de Detergentes
Rey Alberto 3884 – San Miguel
Santiago
Movil +56 9 86797865
www.jypquimicos.cl

además no se debe de reutilizar ni almacenar preparado por un tiempo mayor a 8 horas.

El producto es biodegradable, no contamina el medio ambiente. El recipiente vacío se debe enjuagar y enviarlo a reciclar. El almacenamiento del DETERCEL ENZIMÁTICO sin destapar o que han sido destapados y están en uso, deben mantenerse bien tapados, en sitio fresco, protegidos de la luz, del calor y lejos del alcance de los niños

Características técnicas

- pH : 6,50-8,50
- Densidad (a 20°C) : 0,9 – 1,1 g/cm³
- % solidos : 15-20% m/m

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión acúdase al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. El personal debe utilizar equipo de protección. No devolver saldos diluidos o utilizados al recipiente original. Ver hoja de seguridad del producto. El producto no es inflamable ni se corre riesgo de explosión Caducidad: El producto podría conservar sus especificaciones después de la fecha de caducidad